



SciCan ENSURE^{MC}

Aide à l'interprétation


SCI-BD120 Cartes de test Bowie-Dick ENSURE - 120 cartes
SCI-BD134V Cartes de test Bowie-Dick ENSURE - 30 cartes

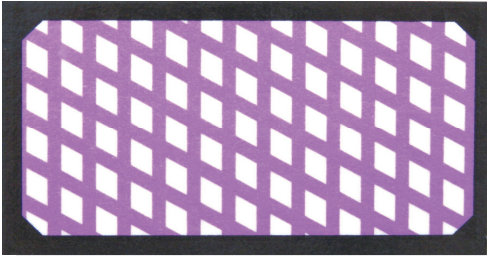


NON EXPOSÉ

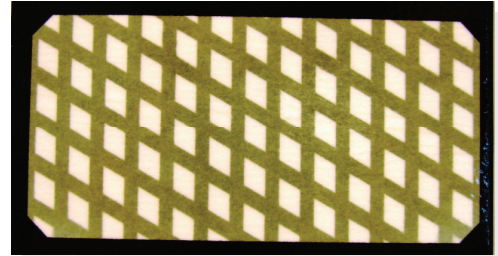


SUCCÈS Aucun défaut

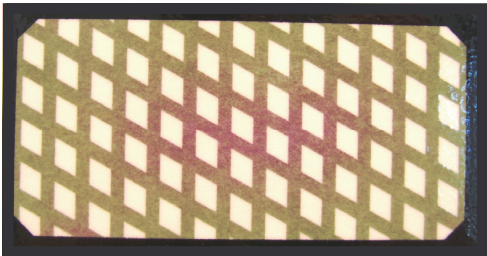


ÉCHEC Léger défaut

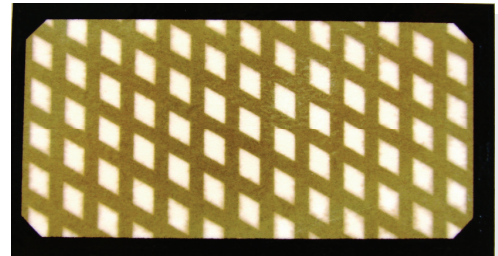


SUCCÈS Durée de séchage courte à moyenne.

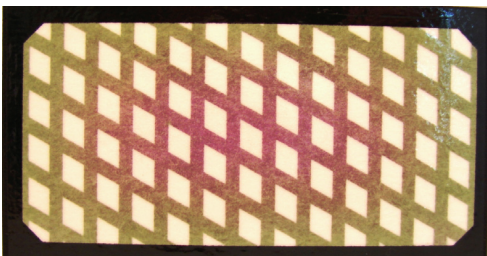


ÉCHEC Défaut modéré

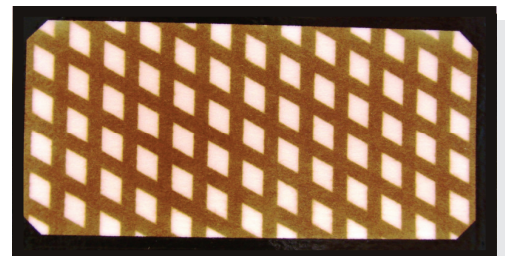

SUCCÈS Durée de séchage excessive. Réduire la durée de séchage à 5 minutes ou moins pour le test Bowie-Dick.

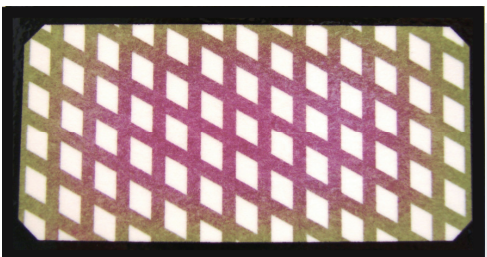

ÉCHEC Gros défaut

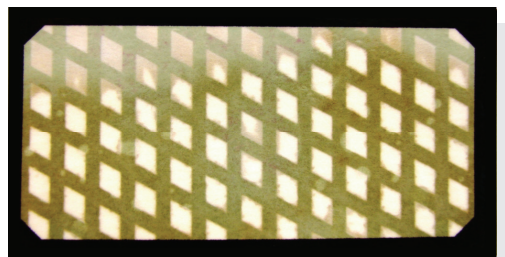

SUCCÈS Pulvérisation d'eau. Si la vapeur ne peut pas être séchée, placez la carte à l'envers, dans le support.

www.scican.com

Ensure est une marque de commerce de SciCan Ltd.
SciCan Ltd. 1440 Don Mills Road, Toronto, ON, M3B 3P9 / Canada | 1-800-667-7733

 **COLTENE**