

SciCan STAT-DRI PLUS

Optimice el proceso de secado de sus instrumentos con el agente de secado STAT-DRI PLUS.

Optimice
su
STATIM



PRESENTACIONES E INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

2OZPLUS	Botella pulverizadora de 2 onzas o 59 ml
8OZPLUS	Botella de repuesto de 8 onzas o 238 ml
8OZPLUST	Botella pulverizadora de 8 onzas o 238 ml
32OZPLUS	Botella de repuesto de 32 onzas o 909 ml

INDICACIONES

Optimice y mejore el secado de los instrumentos en sus STATIM Cassettes con el agente de secado STAT-DRI PLUS.

USO DEL AGENTE SECANTE STAT-DRI PLUS

El tratamiento de las superficies interiores del STATIM Cassette con el agente de secado STAT-DRI PLUS, incluido con su unidad STATIM, optimizará el proceso de secado de los instrumentos. Al ser una solución tensioactiva, recubrir el agente secante STAT-DRI PLUS en toda la superficie interior del casete induce que el agua forme una capa uniforme en la superficie interior, sin gotas. El agua en contacto con las superficies calientes del casete también se evapora de manera mucho más eficiente. Se minimizan las manchas y se optimiza el secado de los instrumentos.

USOS

Utilice STAT-DRI PLUS para proteger el interior de su cassette STATIM y para optimizar el proceso de secado.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA UNIDAD STATIM PARA SU USO

Después de limpiar y secar el casete, trate las superficies interiores con STAT-DRI PLUS.

CUANDO SE USA ENTRE CICLOS

- Limpie las secciones superior (tapa) e inferior (bandeja) de su casete STATIM limpiando las superficies interiores con un paño suave.
- Enjuague bien con agua del grifo.
- Una vez que el casete esté limpio y seco, rocíe STAT-DRI PLUS sobre un nuevo casete limpio y paño desechable o directamente sobre la superficie y luego limpie hasta cubrir uniformemente todas las superficies internas de la tapa y la bandeja del STATIM Cassette.

CUANDO SE UTILIZA DESPUÉS DEL LAVADO DEL CASETE

- Lave el interior del casete (tapa y bandeja) al menos cada semana con jabón para lavar platos o un detergente suave que no contenga cloro.
- Frote el interior con una esponja diseñada para usarse con superficies recubiertas de Teflon™.
- Enjuague abundantemente con agua del grifo para eliminar todos los restos de detergente.
- Una vez que el casete esté limpio y seco, rocíe STAT-DRI PLUS sobre un paño nuevo, limpio y desechable o directamente sobre la superficie, y luego limpie hasta cubrir uniformemente todas las superficies internas de la tapa y la bandeja del STATIM Cassette.




- Pulverice STAT-DRI PLUS dentro de la bandeja



- Pulverice STAT-DRI PLUS dentro de la tapa.



- Limpie la bandeja para una cobertura uniforme.

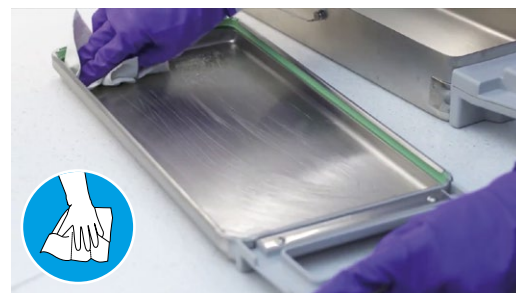

- Limpie la tapa para una cobertura uniforme.

SciCan STAT-DRI PLUS

Para obtener más
información



Optimice el proceso de secado de sus instrumentos
con el agente de secado STAT-DRI PLUS.

RECOMENDACIÓN DE SECADO PARA TODAS LAS UNIDADES STATIM

Para proteger el interior de su STATIM Cassette y optimizar el proceso de secado, STAT-DRI PLUS siempre debe aplicarse al menos cada 10 ciclos y después de cada limpieza del casete. Puede rociar STAT-DRI PLUS sobre una toallita o directamente sobre las superficies del casete, pero no rocíe sobre los instrumentos.

RECOMENDACIÓN DE SECADO PARA PLACAS DE SECADO STATIM 5000

El casete STATIM® 5000 incluye una rejilla estándar y una rejilla adicional con 10 placas de secado fijadas para mejorar el proceso de secado de los instrumentos envueltos. El calor generado por la fase de esterilización es absorbido por las placas de secado y luego transferido directamente a la carga/envolturas. Esto luego da como resultado el secado rápido y acelerado de un STATIM Cassette correctamente cargado.

Las placas ajustables están diseñadas para eliminar la necesidad de un soporte para instrumentos envuelto por separado. Para instalar y ajustar una placa de secado, siga estos pasos:

- Sostenga un plato en la posición deseada, ligeramente inclinado hacia adelante con las pestañas hacia abajo.
- Inserte las pestañas entre la malla de la bandeja para instrumentos no envueltos.
- Cada pestaña tiene una ranura alargada. Deslice la placa hasta que el alambre de la malla esté al final de cada ranura.
- Suelte la placa a la posición de reposo.
- Preparar y cargar instrumentos para esterilización.



Para obtener más información, consulte
el Manual del operador de STATIM

Las placas de secado y STAT-DRI PLUS
son la combinación perfecta para un
secado rápido y preciso de instrumentos
en su STATIM 2000/5000.



www.scican.com

Este documento es solo para uso y distribución en países/territorios de América Latina y Caribe que no son estados o territorios de los Estados Unidos, donde este producto es comercializado para uso con STATIM G4. STATIM y HYDRIM son marcas comerciales registradas; STAT-DRI es una marca registrada de SciCan Ltd.

 **COLTENE**