

# STATCLAVE<sup>MC</sup> G4

Autoclave à chambre à vide



## Technologie de stérilisation **de pointe**

Stérilisateur à chambre, le **STATCLAVE G4** incorpore à la fois des phases de vide avant la stérilisation pour permettre à la vapeur de mieux pénétrer, et des phases de vide après la stérilisation pour obtenir un séchage optimal.



### Rapidité

Le STATCLAVE peut traiter entièrement et efficacement les instruments emballés.



### Séchage

La technologie de séchage à porte fermée et de vide permet chaque fois un séchage parfait des instruments.



### Capacité

Le STATCLAVE peut stériliser jusqu'à 4 cassettes pleine grandeur et 4 cassettes pour instruments d'examen, ou 20 sachets.




### Prévention

Une eau fraîche est utilisée pour chaque cycle, prévenant ainsi l'accumulation d'huile et de résidus.



### Technologie G4

Les équipements G4 peuvent se connecter et envoyer l'information à vos appareils intelligents, vous permettant ainsi d'avoir les données de cycles, les instructions ainsi que les notifications de maintenance au bout de vos doigts.

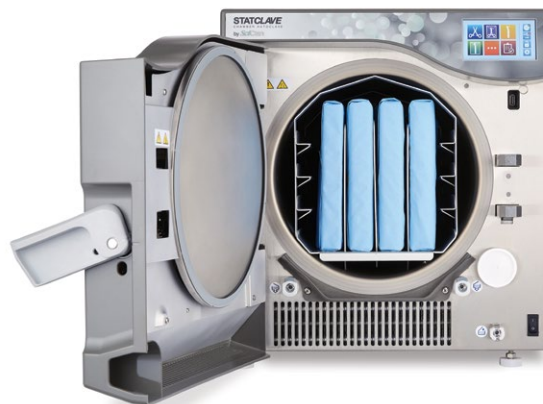

### Polyvalence

Le STATCLAVE offre différentes options de remplissage et de vidange, incluant des réservoirs supérieurs facilement accessibles et lavables, un orifice de remplissage manuel à l'avant et un orifice de remplissage automatique à l'arrière auquel on peut raccorder un système de filtration d'eau Vistapure pour le remplissage automatique.



### Garantie

#### Protection fiable garantie.

Chaque STATCLAVE G4 est couvert par une garantie de 2 ans. Nous garantissons la conception et la qualité de nos stérilisateurs, garantissant ainsi des performances fiables pour votre cabinet.

## Durée des cycles et poids maximal des charges

| Cycles                  | Température / Temps | Durée du cycle (240V)* | Poids maximal de la charge |
|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|
| Solide / Non enveloppé  | 132°C / 4 mins      | 17 mins                | 6 kg                       |
| Solide enveloppé        | 132°C / 4 mins      | 31 mins                | 6 kg                       |
| Creux / Non enveloppé   | 132°C / 4 mins      | 19 mins                | 6 kg                       |
| Creux enveloppé         | 132°C / 4 mins      | 33 mins                | 6 kg                       |
| Textiles / Poreux       | 132°C / 4 mins      | 36 mins                | 2 kg                       |
| Caoutchouc et plastique | 121°C / 20 mins     | 31 mins                | 2 kg                       |
| Cycle adapté**          | —                   | —                      | —                          |

\*La durée du cycle variera en fonction de la charge d'instruments. Les durées de cycles indiquées sont basées sur une charge minimale.

\*\*Ne constitue pas un cycle validé. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de valider tout cycle personnalisé.

## Spécifications de l'appareil

|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dimensions de l'appareil (L x l x H)† | 635 x 450 x 495mm (25" x 17.75" x 19.5")                  |
| Volume                                | 26 L (6.87 gal)                                           |
| Dimensions de la chambre (P x L)      | Diamètre de 1 297 mm, profondeur de 381 mm / 1 po x 15 po |
| Poids                                 | 61,6 kg (135,8 lb) (sans eau ni emballage)                |
| Voltage                               | 120V, 60Hz, 12A / 208V-240V, 60Hz, 12A                    |

† Sur le côté droit de l'appareil, laissez un espace de 50 mm pour la circulation d'air. Laissez un dégagement d'au moins 7 po (180 mm) au-dessus de l'appareil pour accéder librement aux réservoirs (si moins de 7 po, les vis des charnières peuvent être retirées pour pouvoir retirer et remettre le couvercle du réservoir en place en le glissant).

## Accessoires recommandés



### STATPURE<sup>MC</sup>

#### Filtration de l'eau

Produit deux types d'eau de traitement de haute pureté pour les stérilisateurs, les laveurs d'instruments automatisés, les flacons dentaires et les nettoyeurs à ultrasons.

SWP400



### DrainDock<sup>MD</sup>

Un adaptateur de vidange multiport pour disposer d'un point de connexion de vidange unifié pour les équipements du Stéricentre.

- DD158** DrainDock 8-Port
- DD158FK** DrainDock 8-Port with fittings
- DDFK1** DrainDock Fittings Kit

[www.scican.com](http://www.scican.com)

Fabriqué pour :  
**Dent4You AG**  
Bahnhofstrasse 2  
CH-9435 Heerbrugg

Distribué par :  
**SciCan Ltd.**  
1440 Don Mills Rd.  
Toronto, ON M3B 3P9, Canada

STATPURE et DRAINDOCK sont fabriqués par :  
**Vista Water Group**  
1244 CR 1475,  
Ashland, OH 44805, USA

SciCan est une entreprise du Coltene Group. STATCLAVE est une marque de commerce de SciCan Ltd. utilisée sous licence par Dent4You AG. DrainDock est une marque déposée de Vista Water Group. STATPURE est une marque de commerce de Coltene/Whaledent AG.

**SciCan** | Votre Spécialiste en  
Contrôle des Infections