

Limpiador desinfectante para superficies

OPTIM OS1

Un comienzo limpio

Mejor limpieza de la superficie para una mejor desinfección.



Sólo se puede desinfectar una superficie limpia.

OPTIM OS1 es un limpiador-desinfectante de un solo paso que elimina la suciedad y los organismos difíciles de eliminar. Su Sistema Activo LAS refuerza la potente

acción limpiadora de su base tensioactiva con una formulación patentada que también elimina bacterias, virus, bacteria de la tuberculosis y patógenos emergentes en sólo 1 minuto.



TIEMPOS DE ELIMINACIÓN DE 1 MINUTO

tiempos de eliminación de 60 segundos para +40 organismos.



EXCELENTE HUMECTABILIDAD

No se seca antes del tiempo de contacto.



1-PASO

Limpia y desinfecta en un solo paso para una rápida respuesta.



ALTA COMPATIBILIDAD

Probado en superficies duras y no porosas.



SIN COV

Formulado pensando en el usuario.



Tiempos de contacto rápidos para obtener los mejores resultados

- › 60 segundos para eliminar los virus, bacterias y hongos más difíciles.
- › Elimina la bacteria de la tuberculosis en 45 segundos y los hongos y *Candida auris* en 75 segundos



El diseño duradero del paño reduce los costos

- › Gran humectabilidad que cubre una mayor superficie
- › Más eficaces y eficientes que las toallitas de secado rápido de la competencia



Formulado pensando en el usuario

- › Sin COV, sin perfume y sin colorantes
- › Sistema Activo LAS revisado por Health Canada y la EPA en USA



Seguro para su uso en superficies clínicas duras y no porosas

- › Limpia y desinfecta acero inoxidable, aluminio anodizado, encimeras de Corian, silicona, etc



Sistema Activo LAS


Aproveche el poder limpiador y desinfectante del sistema patentado LAS Active System.

Elaborado con un tensioactivo (detergente) ampliamente utilizado en aplicaciones de limpieza comercial, y reforzado con una propiedades biocidas.


Solución OPTIM OS1

Cabeza hidrófila amigable con el agua

Cola de líofilo amigable con la grasa y los residuos

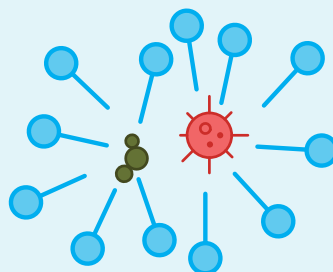

La cabeza de los tensioactivos, amigables con el agua, se adhieren a las moléculas de agua de la solución OS1, mientras que la cola se adhiere al aceite, la grasa, la suciedad, los residuos y la pared celular de bacterias o virus envueltos.

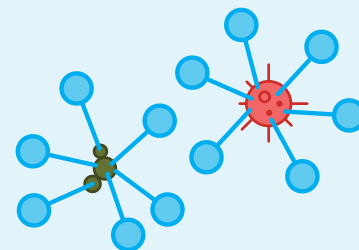

Las moléculas tensioactivas atrapan los residuos y los microorganismos formando lo que se denominan micelas. El LAS Active System penetra en las membranas de las células bacterianas, ayudando a garantizar una desinfección completa.



Tiempo de contacto del desinfectante de superficies*

Nombre del producto	Principio activo	Micobacterias	Virus no envueltos				Virus envueltos				Bacterias				Hongos	
		TB	Adeno	Polio	Noro	Rota	RSV	VIH	VHB (Hepatitis B)	VHC (Hepatitis C)	Influenza A	SARM	VRE	E. coli	PSA	
OPTIM OS1	Sistema Activo LAS	45 segundos	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	75 segundos
OPTIM 33TB	Peróxido de hidrógeno	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	3
Birex SE	Fenólicos	10	10					10			10	10		10	10	10
Patterson pdCare	Alcohol y amonio cuaternario	3						2	2	2	2	2	2	3	3	3
Micro-Kleen 3	Alcohol y amonio cuaternario	3		3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3
Toallitas CaviWipes	Alcohol y amonio cuaternario	3						3		3	3	3	3	3	3	3
Sani-Cloth Super	Alcohol y amonio cuaternario	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Germicida 3	Alcohol	3		3				3	3	3	3	3		3	3	3
BioText	Alcohol anhidro	5												3	3	3
BioSurf	Alcohol anhidro	1												20 segundos	10 segundos	10 segundos
tb Minuteman	Alcohol anhidro	1		1				1			1	1	1	1	1	1
CaviWipes HP	Peróxido de hidrógeno	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Toallitas Clorox HP	Peróxido de hidrógeno	1			1	1	30 segundos	30 segundos	30 segundos	30 segundos	30 segundos	45 segundos	30 segundos	30 segundos	30 segundos	4

*Tiempo de contacto en minutos. Si está en blanco, no se dispone de información publicada. La información se obtuvo de material disponible al público en agosto de 2024. La información se actualizará si se producen cambios en las reclamaciones.

Información para pedidos de OPTIM OS1

Toallitas presaturadas listas para usar

OS1CA-W12 OPTIM OS1 RTU Toallitas desinfectantes (12 x 160 hojas)



Para más información, contáctese con

SciCan Ltd.

T +1 416-445-1600

TF +1 800-667-7733

E customerservice@scican.com



www.scican.com

OPTIM es una marca registrada de SciCan Ltd.
Distribuido por: SciCan Ltd. 1440 Don Mills Rd. Toronto, Ontario, Canadá M3B 3P9

SciCan | Your Infection Control Specialist