


Toallitas OPTIM OS1 Guía de referencia rápida

Consulte la etiqueta del producto antes de utilizar este desinfectante de superficies.

Toallitas OPTIM OS1 Listas para Usar

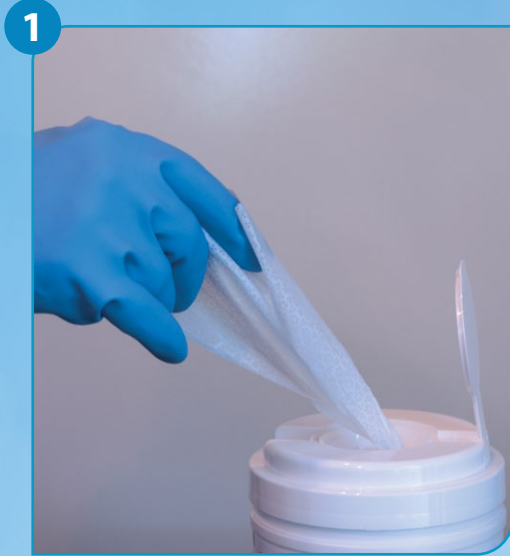

1 Extraiga la toallita OPTIM OS1 en un ángulo de 45 grados. Cierre la tapa.



2 Si la superficie no está muy sucia, límpiela y desinfectela con una toallita y deje que permanezca húmeda durante el tiempo de contacto indicado en la etiqueta.




3 Si la superficie está visiblemente sucia, límpiela con una toallita y deséchela. Utilice una segunda toallita para desinfectar y deje que la superficie permanezca húmeda durante el tiempo de contacto indicado en la etiqueta.

SOLUCIÓN OPTIM OS1 Spray líquido



1 Pulverice el líquido OPTIM OS1 listo para usar sobre una Toallita Seca SciCan. No pulverizar directamente sobre la superficie.

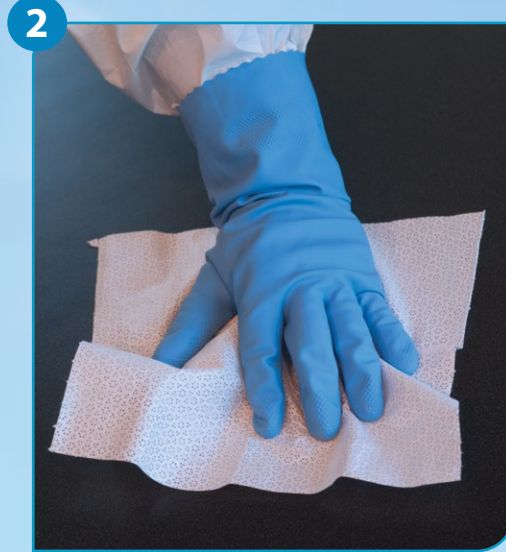

2 Si la superficie no está muy sucia, límpiela y desinfectela con una toallita y deje que permanezca húmeda durante el tiempo de contacto indicado en la etiqueta.



3 Si la superficie está visiblemente sucia, límpiela con una toallita y deséchela. Utilice una segunda toallita para desinfectar y deje que la superficie permanezca húmeda durante el tiempo de contacto indicado en la etiqueta.

¡!

IMPORTANTE

NO permita que OPTIM OS1 se acumule en las superficies.

El uso de gasas humedecidas en soluciones para limpiar puede provocar la formación de charcos y deben secarse con un paño.

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS:

- No aplique OPTIM OS1 en exceso
- El uso de OPTIM OS1 en latón, cobre y acrílico transparente podría decolorar o dañar las superficies, si no se utiliza según las instrucciones y se aplica en exceso.
- Las directrices de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) recomiendan el uso de guantes utilitarios para limpiar y desinfectar superficies.

CONSULTE EL ENVASE ORIGINAL PARA OBTENER INSTRUCCIONES COMPLETAS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Procedimiento de desinfección de los materiales de impresión elastoméricos PVS con OPTIM OS1

1. Una vez tomada la impresión, enjuáguela bien bajo el grifo para eliminar la sangre y la saliva.
2. Tras el enjuague, agite suavemente la impresión dentro de la cubeta del fregadero para eliminar el agua adherida con las mínimas salpicaduras.
3. Rocíe toda la impresión con OPTIM OS1. Utilice los tiempos de contacto indicados en la etiqueta.
4. Enjuague bien la impresión con agua del grifo para eliminar el exceso de desinfectante. Tras un enjuague a fondo, agite suavemente la impresión dentro de la cubeta del fregadero para eliminar el agua adherida con las mínimas salpicaduras.
5. Una vez seca, coloque la impresión desinfectada en una bolsa sellada. La impresión ya está segura y lista para su tratamiento posterior.



Cambio a OPTIM OS1

- Limpie bien todas las superficies con agua y jabón antes de cambiar a OPTIM OS1.
- Después de cambiar a OPTIM OS1, las superficies deben enjuagarse periódicamente con agua (se recomienda no menos de una vez por semana).
- La práctica habitual para todos los desinfectantes químicos es enjuagar y secar periódicamente las superficies para mantener la integridad de la superficie.
- Evite mezclar productos químicos.

