

Se deben consultar las instrucciones de uso antes de utilizar esta lavadora.

OPERACIÓN BÁSICA

1 Encienda la unidad.



El botón está dentro de la placa protectora.

2 Cargue los instrumentos y cierre la puerta.



3 Seleccione el ciclo.



4 Presione **COMENZAR.**



PANTALLA TÁCTIL



Ciclo de enjuague y espera

Evita que la suciedad se seque en los instrumentos.

Cargas incompletas que no serán lavadas dentro de una hora.

NO es un ciclo de limpieza.



Ciclo normal

Instrumentos sueltos moderadamente sucios.



Ciclo de trabajo pesado

Instrumentos y bandejas muy sucias.



Traba de la puerta



Menú de usuario/técnico



Conexión de red



USB



Ablandador de agua/Nivel de detergente/Puerta Estado




Confirmar/avanzar



Atrás

Recargar el depósito de sal del ablandador de agua

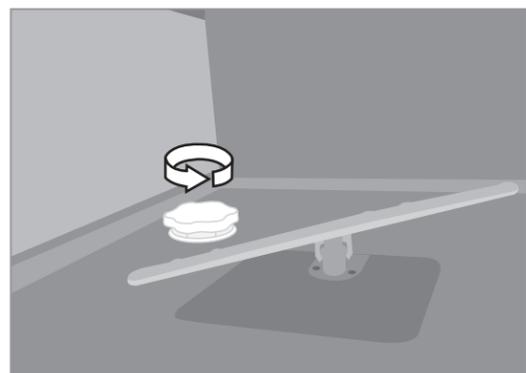

1. Desenrosque la tapa.
2. Llène hasta arriba (máx. 0.5 kg / 1.1 lbs.)
3. Enrosque la tapa con fuerza.
4. Ponga en marcha un ciclo completo sin instrumentos.

¡IMPORTANTE!

Si el contenedor de sal se llena por primera vez, se DEBE llenar con al menos 1 litro de agua antes de agregar la sal.

Sólo se debe utilizar sal en tabletas en la unidad ablandadora. La sal de grano fino, como la sal de mesa, NO debe ser utilizada porque podría obstruir la unidad.

La sal del ablandador de agua también se encuentra disponible en SciCan. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local.

Limpiar la cámara

Vierta 1.0L de neutralizador de instrumentos a base de vinagre o ácido cítrico en la cámara y siga estos pasos:




¡IMPORTANTE! Realice un ciclo de limpieza de la cámara cada 25 ciclos.

Omitir la limpieza de la cámara puede promover la corrosión.

Reemplazar la solución de limpieza HIP™

Medidas de precaución recomendadas con respecto a la manipulación segura de la solución HIP:

- Utilice guantes quirúrgicos y protección ocular que no estén dañados.
- Después de manipular el producto, quítese y deseche los guantes y lávese las manos antes de quitarse la protección ocular.

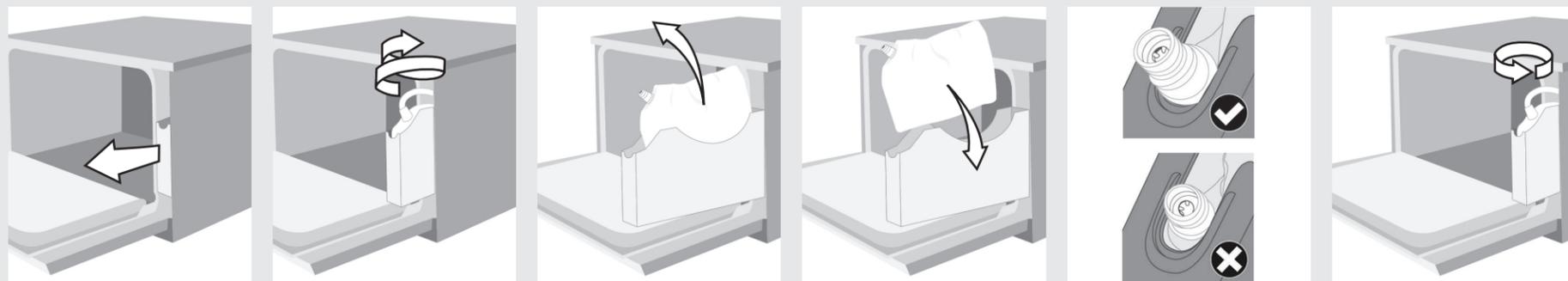

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte las instrucciones de uso para una lista más completa. Llame al servicio técnico si las recomendaciones sugeridas no resuelven el mensaje de error.

CF2 Fallo en el llenado de la cámara	Verifique que las mangueras de agua no estén enroscadas.
	Verifique que las llaves de paso de agua estén abiertas.
	Llame al servicio técnico.
CF23 Brazo de lavado superior a bajas revoluciones La velocidad del brazo de lavado superior es demasiado baja.	Verifique si hay obstrucciones en la rotación del brazo de lavado superior.
	Verifique que los agujeros de los brazos de lavado no estén tapados.
CF24 Brazo de lavado inferior a bajas revoluciones La velocidad del brazo de lavado inferior es demasiado baja.	Verifique si hay obstrucciones en la rotación del brazo de lavado inferior.
	Verifique que los agujeros de los brazos de lavado no estén tapados.

Repuestos y accesorios

CS-HIPC-U	HIP- Solución de ultra limpieza (8 x 750 ml)
01-112594S	Sal del ablandador de agua
01-108305S	Kits de prueba de agua
01-114390S	Filtros HEPA



La esterilización final de los instrumentos **DEBE** completarse luego del procesamiento en el HYDRIM C61W G4.