

Se deben consultar las instrucciones de uso antes de utilizar esta lavadora.

OPERACIÓN BÁSICA

1 Unidad de energía ENCENDIDA.



2 Carga de instrumentos.



3 Cierre la puerta.



4 Seleccione el ciclo y presione COMENZAR.



PANTALLA TÁCTIL



Ciclo de enjuague y espera

Evita que la suciedad se seque en los instrumentos.
Cargas incompletas que no serán lavadas dentro de una hora.
NO es un ciclo de limpieza.



Ciclo normal

Instrumentos sueltos moderadamente sucios.



Ciclo de trabajo pesado

Instrumentos y bandejas muy sucias.



Traba de la puerta



Menú de usuario/técnico



Conexión de red



USB



Ablandador de agua/Nivel de detergente/Puerta Estado




Confirmar/avanzar



Atrás

Recargar el depósito de sal del ablandador de agua

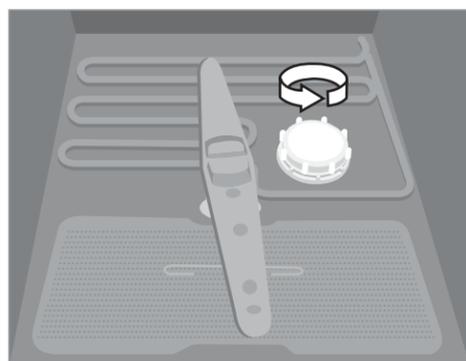

1. Desenrosque la tapa.
2. Llene hasta arriba (máx. 1 kg / 2.2 lbs.)
3. Enrosque la tapa con fuerza.
4. Ponga en marcha un ciclo completo sin instrumentos.

¡IMPORTANTE!

Si el contenedor de sal se llena por primera vez, se DEBE llenar con al menos 1 litro de agua antes de agregar la sal.
Sólo se debe utilizar sal en tabletas en la unidad ablandadora. La sal de grano fino, como la sal de mesa, NO debe ser utilizada porque podría obstruir la unidad.
La sal del ablandador de agua también se encuentra disponible en SciCan. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local.

Limpiar la cámara

Vierta 1.0L de neutralizador de instrumentos a base de vinagre o ácido cítrico en la cámara y siga estos pasos:




¡IMPORTANTE! Realice un ciclo de limpieza de la cámara cada 25 ciclos. Omitir la limpieza de la cámara puede promover la corrosión.

Reemplazar la solución de limpieza HIP™

Medidas de precaución recomendadas con respecto a la manipulación segura de la solución HIP:

- Utilice guantes quirúrgicos y protección ocular que no estén dañados.
- Después de manipular el producto, quítese y deseche los guantes y lávese las manos antes de quitarse la protección ocular.

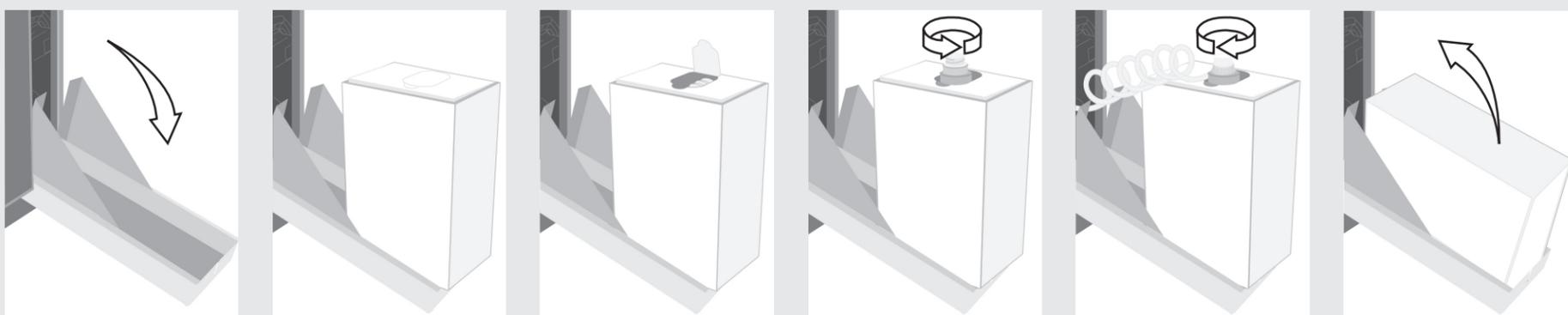

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte las instrucciones de uso para una lista más completa. Llame al servicio técnico si las recomendaciones sugeridas no resuelven el mensaje de error.

CF2 Llenado de la cámara El agua no está llenando la cámara	Verifique que las mangueras de agua no estén enroscadas. Verifique que las llaves de paso de agua estén abiertas. Llame al servicio técnico.
CF15 Desborde de la reserva de agua Interruptor de desborde accionado	Reinicie el programa. Llame al servicio técnico.
CF21 Sistema dosificador No se está expendiendo detergente	Apriete la tapa del detergente. Verifique que no haya pérdidas. Llame al servicio técnico.
CF28 Sin presión de agua	Verifique que las llaves de paso de agua estén abiertas. Verifique que las mangueras de agua no estén enroscadas. Llame al servicio técnico.

Repuestos y accesorios

CS-HIPL	Solución de limpieza HIP (2 x 3.8L)
01-112594S	Sal del ablandador de agua
01-108305S	Kits de prueba de agua
01-111780S	Filtros HEPA



La esterilización final de los instrumentos **DEBE** completarse luego del procesamiento en el HYDRIM L110W G4.

POR FAVOR, PARA INFORMACIÓN MÁS DETALLADA VEA LAS INSTRUCCIONES DE USO PROVISTAS