




FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

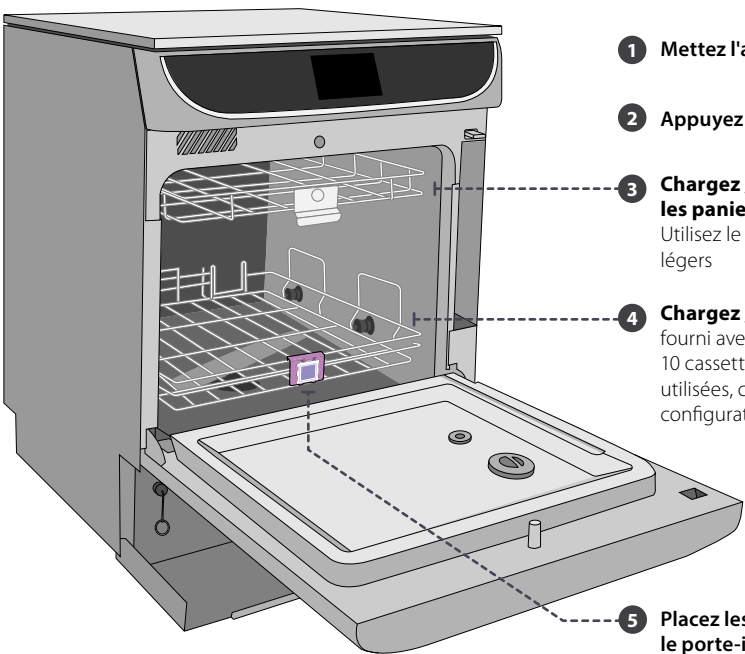

Procédez comme suit :

- 1

Mettez l'appareil sous tension.
- 2

Appuyez sur pour déverrouiller la porte
- 3

Chargez les instruments en **vrac** dans les **paniers supérieurs** fournis avec l'appareil. Utilisez le panier à charnières pour les petits objets légers
- 4

Chargez les **cassettes** dans le **rack inférieur** fourni avec l'appareil. Le rack peut contenir jusqu'à 10 cassettes standard. Si les cassettes ne sont pas utilisées, consulter le manuel utilisateur pour d'autres configurations
- 5

Placez les indicateurs test de lavage sur le porte-instruments du bas (si nécessaire)
- 6

Fermez la porte
- 7

Sélectionnez un cycle
- 8

Le temps de séchage par défaut est basé sur une charge maximale utilisant le produit de rinçage STAT-DRI. Ajustez le temps de séchage en fonction de vos besoins.
- 9

Laissez le cycle se dérouler jusqu'à son terme
- IMPORTANT!

Retirez les indicateurs chimiques des cassettes avant de les charger



ÉCRAN TACTILE

Cycle « Rinçage et mise en attente »
À utiliser pour empêcher les souillures de sécher sur les instruments lorsqu'ils ne sont pas lavés immédiatement après leur chargement.

Cycle standard (instruments en vrac)
Pour les instruments en vrac modérément sales.

Cycle intensif (cassettes)
Pour les instruments et les cassettes très sales.

Serrure de porte

Enregistrements de cycles

Connectivité

Paramètres

Notifications

GUIDE DES ALARMES

Actualisez pour effacer l'alarme. Si la fenêtre pop-up reste ouverte, d'autres étapes sont nécessaires pour résoudre le problème.

Journal des événements pour plus d'informations.

GUIDE LUMINEUX LED

BLANC Prêt à l'emploi

BLEU Cycle en cours

VERT Cycle terminé

JAUNE Cycle arrêté par l'utilisateur ou condition *clignotant* d'alerte détectée pendant le cycle

ROUGE Cycle défectueux ou situation d'alarme

ORANGE Mise à jour du logiciel


ROSE Accès à l'appareil par un technicien à distance

GRIS Mode usine ou maintenance

PORTE OUVERTE – PAS DE COURANT

1. Ouvrez la plaque d'appui.
2. Tirez sur l'anneau situé en bas à gauche.

ATTENTION : il peut rester du liquide dans l'appareil et les instruments peuvent être très chauds.
Si le cycle a été interrompu, les instruments ne doivent pas être utilisés et doivent être retirés.

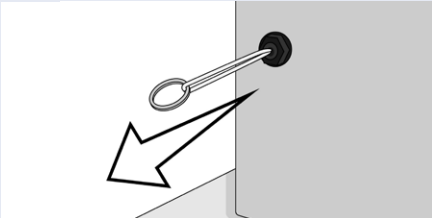

UTILISATION DES INDICATEURS DE TEST DE LAVAGE

Les **indicateurs de test de lavage SciCan (WTI)** sont utilisés pour le contrôle de routine du processus de nettoyage dans les laveurs d'instruments. Ils constituent une méthode fiable et reproductible pour vérifier régulièrement les performances de votre processus de lavage automatisé. Les WTI sont spécifiquement conçus pour être utilisés dans les unités HYDRIM avec la solution HIP.


Placez l'indicateur sur le bord extérieur du porte-instruments du bas (voir l'illustration du FONCTIONNEMENT DE BASE ci-dessus). Suivez les directives réglementaires locales pour la fréquence requise de vérification de test de lavage.

CALENDRIER D'ENTRETIEN

CHAQUE JOUR	UNE FOIS PAR MOIS	TOUS LES 25 CYCLES	CHAQUE 750 CYCLES DE SÉCHAGE	UNE FOIS PAR AN
Vérifiez la rotation du bras de lavage. Vérifiez visuellement que le joint de la porte et les chariots ne sont pas usés ou endommagés. Vérifiez et nettoyez les filtres de la chambre.	Vérifiez le verrouillage de la porte. Lancez un cycle et essayez immédiatement d'ouvrir la porte. N'essayez pas lorsque les bras de lavage tournent.	Lancez un cycle de nettoyage. Voir NETTOYAGE DE LA CHAMBRE .	Remplacez le filtre à air. Pour les instructions vidéo : PARAMÈTRES ➤ GÉNÉRAL ➤ INSTRUCTIONS ➤ Remplacez le filtre à air	Entretien annuel par un technicien agréé.


NETTOYAGE DU FILTRE DE LA CHAMBRE

1. Tournez l'écrou métallique au centre du filtre pour le démonter.
2. Rincez-le sous un robinet et remettez-le en place.

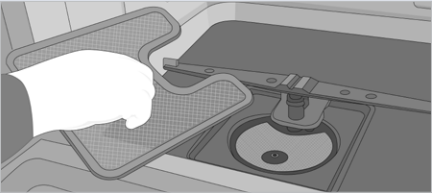

NETTOYAGE DE LA CHAMBRE

1. Versez 750 ml (25 oz) de vinaigre ou d'acide citrique dans le fond de la chambre vide (avec les racks) puis fermez la porte.
2. Sélectionnez **PARAMÈTRES** ➤ **NETTOYAGE** ➤ **START**

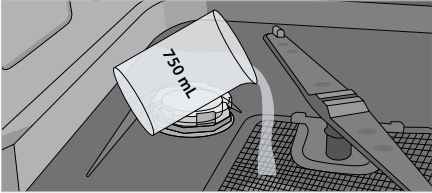

La stérilisation terminale des instruments DOIT FAIRE SUITE au traitement dans l'HYDRIM 112W G4+

NE PAS introduire de fraises dentaires dans le HYDRIM.

ARRÊTER UN CYCLE

En appuyant sur la touche STOP, on interrompt le cycle et il ne peut pas être repris.
Les charges interrompues en cours de cycle doivent être entièrement retirées.

1. Pressez **ARRÊTEZ**
2. Attendez que l'appareil se vide.
3. Appuyez sur et utilisez des gants pour manipuler les instruments.



UTILISER LE MODE SUSPENSION D'ACTIVITÉ (pour des périodes prolongées d'inutilisation)

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus d'une semaine, activez le mode Suspension d'activité (« vacation mode »). Cela empêchera tout détergent résiduel dans les tuyaux de sécher et de les obstruer.

PARAMÈTRES

SYSTÈME

MODE SUSPENSION D'ACTIVITÉ

Suivez les instructions à l'écran.

VIDÉOS D'APPRENTISSAGE

L'HYDRIM dispose de plusieurs vidéos d'entretien et d'installation pour aider les utilisateurs à bien prendre soin de l'appareil.

PARAMÈTRES

GÉNÉRALITÉS

INSTRUCTIONS

Pièces détachées/consommables

CS-HIPT	Solution de nettoyage HIP (4 x 1,75 L)
01-112594S	Sel adoucisseur d'eau
01-108305S	Kits d'analyse de l'eau
WTI-SK	Indicateur de test de lavage – Kit de démarrage
WTI-RK	Indicateur de test de lavage – Kit de recharge
8OZPLUS	STAT-DRI PLUS 8 oz. Bouteille avec bouchon
32OZPLUS	STAT-DRI PLUS 32 oz. Bouteille de recharge
01-113277S	Filtre HEPA