


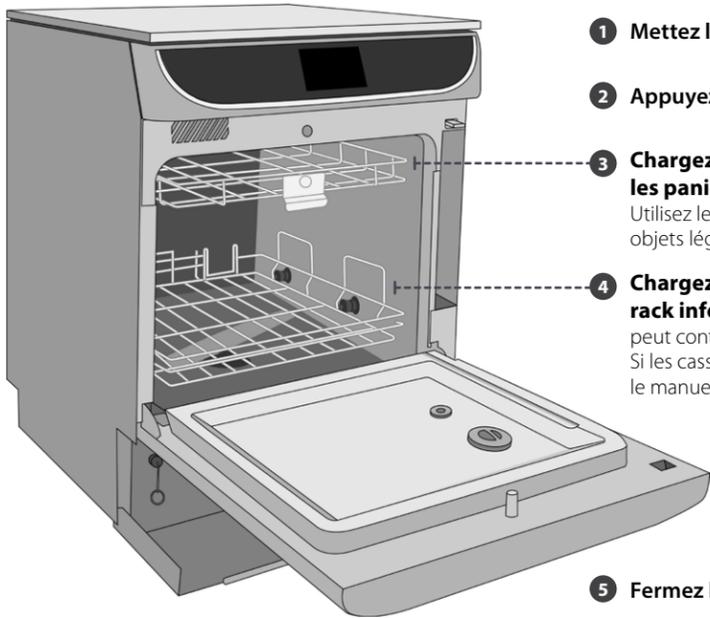

## FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

### Procédez comme suit :

- 1 Mettez l'appareil sous tension.
- 2 Appuyez sur pour déverrouiller la porte
- 3 Chargez les instruments en vrac dans les paniers supérieurs fournis avec l'appareil. Utilisez le panier à charnières pour les petits objets légers
- 4 Chargez les cassettes dans le rack inférieur fourni avec l'appareil. Le rack peut contenir jusqu'à 10 cassettes standard. Si les cassettes ne sont pas utilisées, consulter le manuel utilisateur pour d'autres configurations




5 Fermez la porte

6 Sélectionnez un cycle

7 Le temps de séchage par défaut est basé sur une charge maximale utilisant le produit de rinçage STAT-DRI. Ajustez le temps de séchage en fonction de vos besoins.

Pressez DÉBUT

8 Laissez le cycle se dérouler jusqu'à son terme

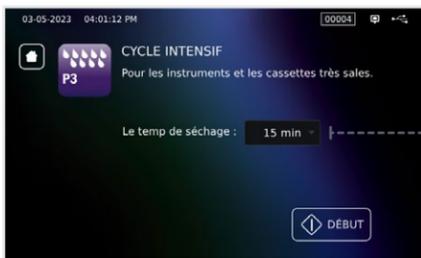

## ÉCRAN TACTILE



### Cycle « Rinçage et mise en attente »

À utiliser pour empêcher les souillures de sécher sur les instruments lorsqu'ils ne sont pas lavés immédiatement après leur chargement.



### Cycle standard (instruments en vrac)

Pour les instruments en vrac modérément sales.



### Cycle intensif (cassettes)

Pour les instruments et les cassettes très sales.



Serrure de porte



Enregistrements de cycles



Connectivité



Paramètres



Notifications

## GUIDE LUMINEUX LED



BLANC Prêt à l'emploi



BLEU Cycle en cours



VERT Cycle terminé



JAUNE Cycle arrêté par l'utilisateur ou condition d'alerte détectée pendant le cycle \*clignotant\*



ROUGE Cycle défectueux ou situation d'alarme



ORANGE Mise à jour du logiciel



ROSE Accès à l'appareil par un technicien à distance



GRIS Mode usine ou maintenance

## ARRÊTER UN CYCLE

En appuyant sur la touche STOP, on interrompt le cycle et il ne peut pas être repris. **Les charges interrompues en cours de cycle doivent être entièrement retraitées.**

1. Pressez ARRÊTEZ
2. Attendez que l'appareil se vide.
3. Appuyez sur et utilisez des gants pour manipuler les instruments.




## PORTE OUVERTE – PAS DE COURANT

1. Ouvrez la plaque d'appui.
2. Tirez sur l'anneau situé en bas à gauche.

**ATTENTION :** il peut rester du liquide dans l'appareil et les instruments peuvent être très chauds.


Si le cycle a été interrompu, les instruments ne doivent pas être utilisés et doivent être retraités.

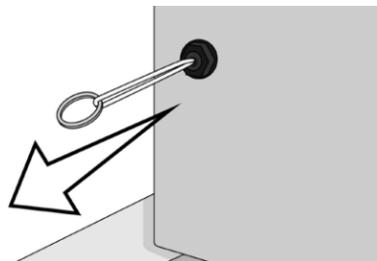

## NETTOYAGE DE LA CHAMBRE

L'HYDRIM vous rappellera de lancer un cycle de nettoyage tous les 25 cycles pour éliminer les dépôts d'eau calcaire sur les parois de la chambre et sur les racks. La fréquence de rappel peut être réglée par un technicien.

1. Versez 750 ml (25 oz) de vinaigre ou d'acide citrique dans le fond de la chambre vide (avec les racks) puis fermez la porte.
2. Sélectionnez **PARAMÈTRES** **NETTOYAGE** **START**

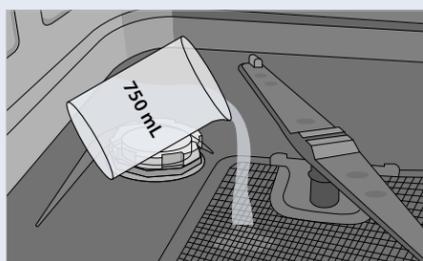


## UTILISATION DES INDICATEURS DE TEST DE LAVAGE

Les indicateurs de test de lavage SciCan (WTI) sont utilisés pour le contrôle de routine du processus de nettoyage dans les laveurs d'instruments. Ils constituent une méthode fiable et reproductible pour vérifier régulièrement les performances de votre processus de lavage automatisé. Les WTI sont spécifiquement conçus pour être utilisés dans les unités HYDRIM avec la solution HIP.

**REMARQUE :** Si vous n'utilisez qu'un seul indicateur, placez-le sur le rack inférieur.

Conformez-vous aux directives réglementaires locales pour connaître la fréquence requise pour la vérification du lavage.

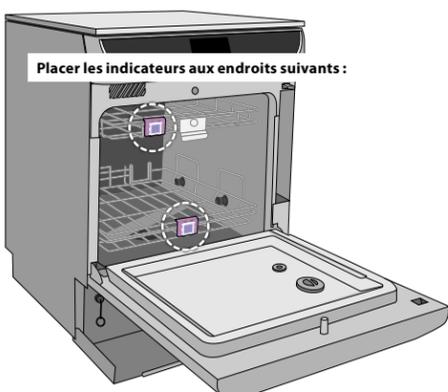

Placer les indicateurs aux endroits suivants :

## UTILISER LE MODE SUSPENSION D'ACTIVITÉ (pour des périodes prolongées d'inutilisation)

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus d'une semaine, activez le mode Suspension d'activité (« vacation mode »). Cela empêchera tout détergent résiduel dans les tuyaux de sécher et de les obstruer.

### DÉMARRER LE MODE SUSPENSION D'ACTIVITÉ (« VACATION MODE »)



PARAMÈTRES



MODE SUSPENSION D'ACTIVITÉ



Suivez les instructions à l'écran.

### ARRÊTER LE MODE SUSPENSION D'ACTIVITÉ

Appuyez sur l'écran et il vous sera demandé si vous êtes prêt à désactiver le mode suspension d'activité.

OUI

Fixez le capuchon du détergent sur un sachet de détergent puis appuyez sur OUI.

NON

Vous pouvez accéder à l'écran LCD lorsque l'appareil est en mode suspension d'activité.

## VIDÉOS D'APPRENTISSAGE

L'HYDRIM dispose de plusieurs vidéos d'entretien et d'installation pour aider les utilisateurs à bien prendre soin de l'appareil.



PARAMÈTRES



GÉNÉRALITÉS



INSTRUCTIONS

## Pièces détachées/consommables

CS-HIPT	Solution de nettoyage HIP (4 x 1,75 L)
01-112594S	Sel adoucisseur d'eau
01-108305S	Kits d'analyse de l'eau
WTI-SK	Indicateur de test de lavage – Kit de démarrage
WTI-RK	Indicateur de test de lavage – Kit de recharge
8OZPLUS	STAT-DRI PLUS 8 oz. Bouteille avec bouchon
32OZPLUS	STAT-DRI PLUS 32 oz. Bouteille de recharge
01-114390S	Filtre HEPA



**La stérilisation terminale des instruments DOIT FAIRE SUITE au traitement dans l'HYDRIM 112W G4+**