

VistaCool

Sistema de reducción térmica con conexión directa al drenaje para el agua residual del autoclave



Elimina la necesidad de botellas de condensación en autoclaves

enfriando el agua residual del esterilizador y eliminándola directamente por el desagüe de forma automática.



Protege los gabinetes

Ayuda a prevenir la formación de hongos, moho, descomposición y óxido originados por los derrames y los entornos húmedos creados por la expulsión proveniente de botellas de condensación.



Protege al personal

Elimina la necesidad para el personal del consultorio de vaciar las botellas de agua caliente manualmente.



Protege los drenajes

Previene daños en las tuberías causados por el agua residual del autoclave. Su sistema antirreflujo integrado cumple o excede los códigos locales para tuberías.



Ahorra tiempo


¡Sistema sin electricidad, autorregulable que ahorra tiempo al personal y no requiere mantenimiento por parte del usuario!



Instalable en cualquier lugar.

El innovador diseño del nuevo VistaCool 3 proporciona todas las mismas ventajas que sus predecesores ocupando menos espacio.


Los clips de montaje incluidos con el sistema y la línea de drenaje presurizada permiten instalarlo en vertical u horizontal en casi cualquier ubicación.

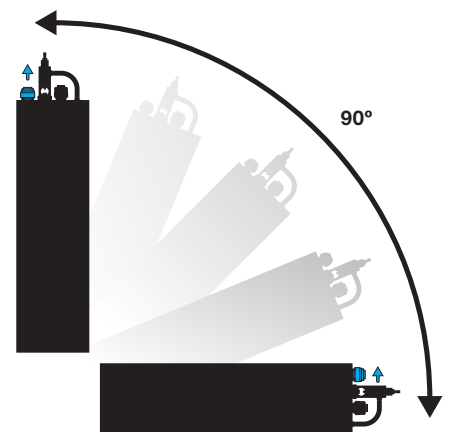


Especificaciones del sistema



V7601 Para un autoclave

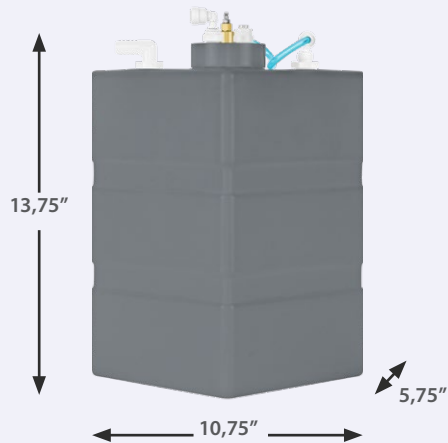

V7501 Para un autoclave

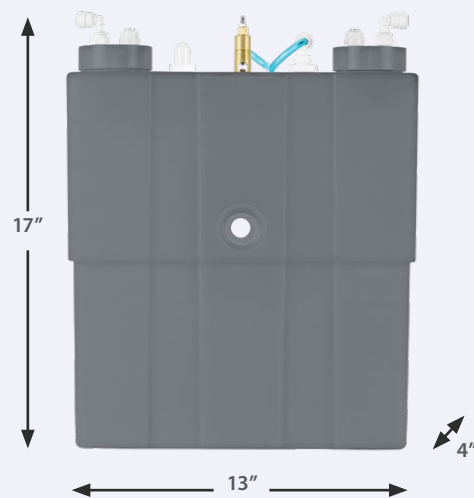

V7502 Para dos autoclave


Observación: Los soportes del tanque, opcionales y ajustables, elevan la altura de instalación de los modelos V7501 y V7502 entre 1/2" y 5" en incrementos de media pulgada. Solicite S7545 para V7501; solicite S7547 para V7502.

Requisitos de instalación

Conexión de 1/4" para el suministro de agua fría: ¡Se incluyen accesorios de suministro, válvula de suministro de agua, línea de alimentación de agua fría y válvulas antirretorno VistaCheck Dual Check aprobadas por QAI! El accesorio de espacio de aire está disponible por separado si así lo exigen las autoridades locales.

Conexión de desagüe con sifón: Incluye sensores térmicos en línea para garantizar que las aguas residuales estén lo suficientemente frías como para enviarlas directamente al desagüe. Tee utilitario de 1-1/2" con accesorios de inserción rápida incluidos con los modelos V7501 y V7502. Se recomienda el adaptador de drenaje multipuerto DrainHub opcional para permitir múltiples conexiones de drenaje en un conjunto de concentrador pequeño que ahorra espacio.

Accesorios recomendados

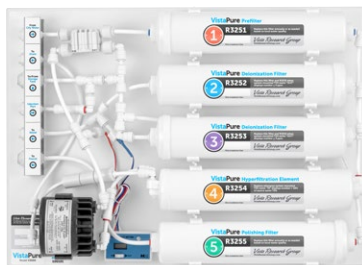

VistaPure

Filtración de agua

Proporciona dos grados de agua de alta calidad para autoclaves, recipientes dentales, limpiadores ultrasónicos y el ciclo de enjuague de los lavadores de instrumentos.

V3000



VistaPure AutoFill

Repone cualquier modelo nuevo o antiguo de los autoclaves STATIM con agua destilada de calidad, permitiendo una auténtica comodidad sin necesidad de usar las manos.

S3020




DrainHub

Adaptador de drenaje multipuerto

Este dispositivo, aprobado por QAI y con patente en trámite, admite hasta ocho conexiones de drenaje en un pequeño concentrador, lo que ahorra espacio, dinero y tiempo.

DH154 - Adaptador de drenaje de cuatro puertos

DH158-82 - Adaptador de drenaje de ocho puertos con kit de accesorios

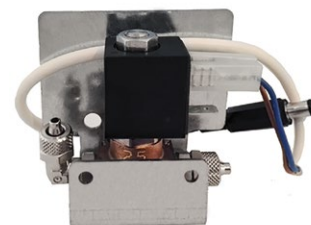

Kit EV auxiliar BRAVO G4

Rellene el depósito de agua interno de SciCan BRAVO G4 con agua de calidad de autoclave automáticamente, lo que permite una verdadera comodidad de manos libres.

M7C200012

Distribuido por:
SciCan Ltd.
1440 Don Mills Rd
Toronto, ON
M3B 3P9, Canada
TF +1 (800) 667-7733
T +1 (416) 445-1600
customerservice@scican.com

VistaPure y VistaCool son
fabricados para:
Crosstex International, Inc.
1625 Pinnacle Peak Rd
Phoenix, AZ 85027, USA
T +1 888-276-7783
HuFriedyGroup.com

www.scican.com

SciCan | Your Infection
Control Specialist

STATIM es una marca registrada y BRAVO es una marca comercial de SciCan Ltd. Todos los nombres de productos Vista son marcas comerciales de HuFriedy Mfg. Co. LLC, sus filiales o empresas relacionadas, a menos que se indique lo contrario. Marcas no registradas en todas las jurisdicciones.