

AutoFill VistaPure

En mode mains libres!

Les accessoires AutoFill brevetés de VistaPure permettent de réapprovisionner automatiquement les autoclaves STATIM de SciCan en eau de qualité distillée— plus aucun besoin de les remplir manuellement!

Le kit d'accessoires VistaPure AutoFill peut être installé facilement sur n'importe quel STATIM 2000 G4 ou 5000 G4 en quelques minutes seulement !

- ✓ Plus besoin d'acheter ni d'entreposer d'eau distillée
- ✓ Plus de défaillances de cycle causées par un oubli de remplir les réservoirs
- ✓ Plus de dégâts causés par un remplissage manuel
- ✓ Plus de pertes de temps à remplir les autoclaves = plus de temps pour les patients

AutoFill pour STATIM (S3020)




Installation de l'AutoFill VistaPure Installation

Un tube transparent de 12 pieds en polyuréthane est déjà raccordé au collecteur AutoFill. Si la distance qui relie le VistaPure et l'autoclave est supérieure à 12 pieds, commandez simplement un tube transparent en polyuréthane plus long; la distance entre le VistaPure et l'autoclave n'est pas limitée, sauf par la longueur du tube.

Installation de l'AutoFill sur un STATIM

L'AutoFill VistaPure pour STATIM (S3020) peut être installé sur tout nouveau ou ancien modèle d'autoclave STATIM 2000 ou 5000 comme suit :

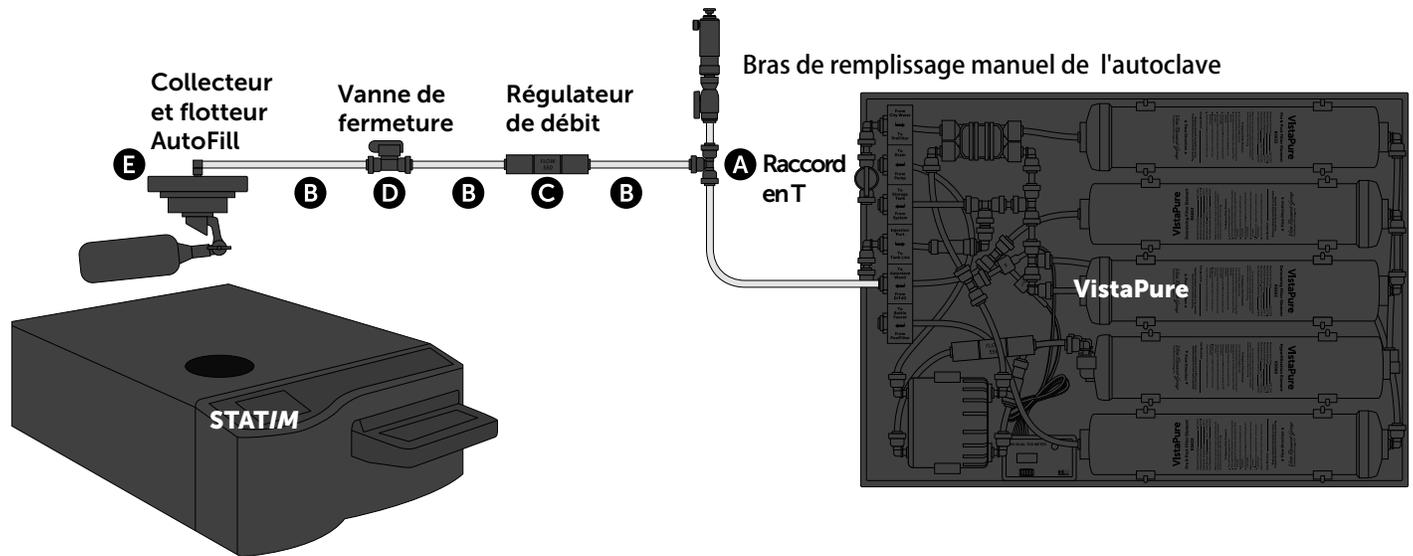

Distribué par :
SciCan Ltd.
1440 Don Mills Rd, Toronto
ON M3B 3P9 / Canada
T +1 416-445-1600
F +1 416-445-2727
TG +1 800-667-7733
customerservice@scican.com

Fabriqués pour :
Crosstex International, Inc.
1625 Pinnacle Peak Rd
Phoenix, AZ 85027 USA
888-276-7783
HuFriedyGroup.com

www.scican.com

SciCan | Votre Spécialiste en
Contrôle des Infections